

RECOMENDACIONES

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ENVÍOS:

1. Envolver Gradillas en film transparente
2. Envolver Botes de Orina en film transparente. Agrupar los botes de 4 en 4 udes.
3. Etiquetas: poner el código de barras vertical, con el nº de muestra en la parte superior
4. Pruebas Especiales:
Dependiendo de la prueba adjuntar -----> 2 botes bioquímica o 2 botes hemograma
5. Llenar los tubos de hemograma hasta la flecha indicativa
6. Agitar bien los tubos de hemograma para evitar que se coagulen
7. Centrifugar los tubos de bioquímica
8. Poner los números de referencia en tandas correlativas, evitar números sueltos
9. Colocar las muestras ordenadas en las gradillas por números correlativos
10. Cuando se vayan a enviar + 2 neveras, unirlas con cinta adhesiva para que vayan juntas

Labosev, detrás de cada muestra hay un paciente



Laboratorio de Análisis Clínicos
Técnicas Especiales

C/Amor 11 - 41006. Sevilla. Tel: 95 425 84 81 / 657 798 403
labosev@labosev.com

